

CareWave Lejringsprodukter

En videreudvikling af lejringsprodukter og deres udformning med mange brugsmæssige fordele

Gør livet meget lettere for patienterne, fordi det er blødt og smyger sig til kroppen, ligger stabilt og ikke er varmeproducerende.

Gør livet lettere for plejepersonalet, fordi de vejer meget lidt og er uhyre lette at arbejde med, også når det drejer sig om lejrning af smerteprægede, deformerede patienter, som det ellers kan være meget svært at lejre rigtigt og sikkert.



Lejringsprodukterne består af mikrokugler af finkornet polystyren omgivet af et bi-elastisk polyurethan-overtræk, som er forbehandlet mod mikrober. Denne konstruktion medfører en helt unik krops- og temperaturltilpasning, samt god hygiejne.

Dette sortiment er udviklet efter plejepersonalets udtrykte behov til forskellige, krævende plejesituationer. Lejringsprodukterne er designet til anvendelse ved tryksårstruede patienter med meget forskellig morfologi. Det er velkendt at hyppig forflytning og anbringelse i forskellige aflastende ligestillinger nedbringer risikoen for tryksår.




Universalpuden 1 stk. 60x40 cm eller 2 stk. 40x30 cm

- Opfylder en række forskellige behov.
- Støtter patienter i abdominalregionen, samtidig med at produktet "decubitus lateral" støtter dorsalsiden af kroppen i sidelejrning.
- Kan understøtte lokalt i knæregionen og understøtte meget tynde ben, malleolerne, achillesområdet og underben for at lette trykket i fodområdet.

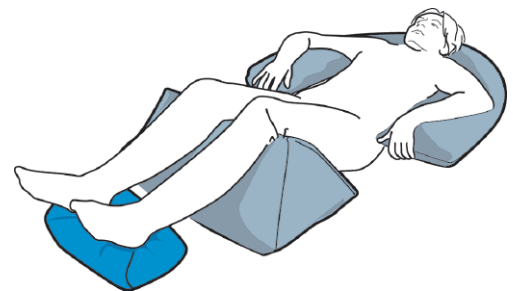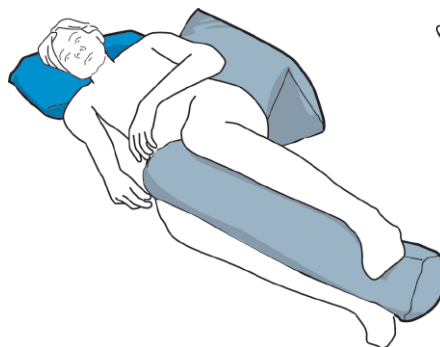


Den bløde banan 180x31 cm

- Understøtter ryggen i sideleje evt. sammen med produktet ”decubitus lateral” ved at anbringe den dorsalt i brysthøjde.
- Støtter patienten i siddestilling hvis patienten har en tendens til at ”vælte” til siden.

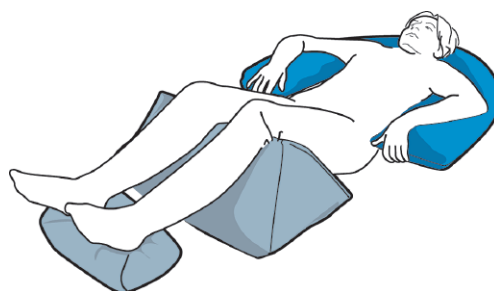


Decubitus lateral 180x31 cm

- Tilpasses patientens morfologi når den anbringes dorsalt med patienten i sideleje (30°).
- Støtter fra skuldrene langs ryggen, hoftet, knæ og malleoler og nedsætter friktionen fra lejringsfladen.

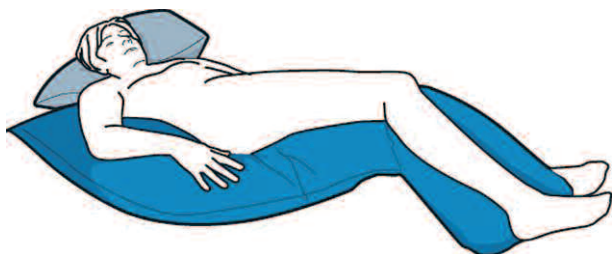

Halskraven 130x21 cm

- Giver behagelig støtte til hovedet når patienten er i sideleje.
- Kan også anvendes i siddestilling hvor hovedstøtte er nødvendig.

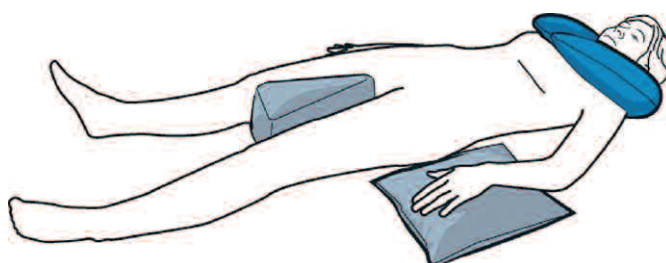


Cylinder 1 stk. 70x18 cm eller 2 stk. 31x17 cm

- Støtter i sideleje når den placeres mellem benene eller understøtter liggefladen af benet, hvor man ønsker den laterale malleol løftet let samtidig med at man bruger hælbeskyttere for at lette tryk og friktion af lateralsiden af fod og hæl.



Semi-Fowler pude 70x56x15 cm

- Tilpasser sig patienternes forskellige morfologi. Den støtter patienten i en Semi-Fowler (rygstøtte hævet 30° og bækkenet sænket 30°). Til etablering af bækkensænkning på ca. 30° placeres puden under lårene og "afstandskilen" fremad mellem knæene. I denne position kan Cylinderpuden temporært anvendes i hælniveau.

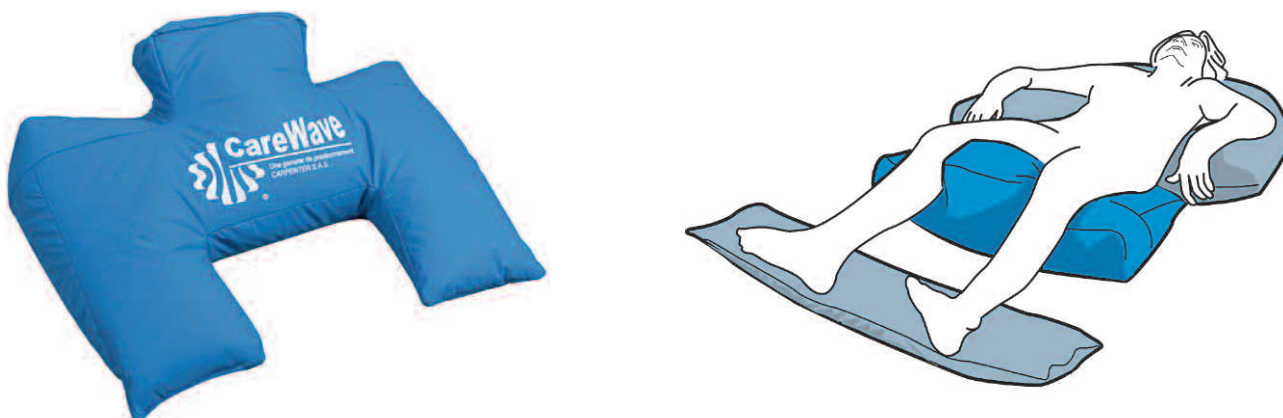

Trekanten 60x41 cm


- Tilpasser sig patientens morfologi. Giver behagelig støtte i abdomenområdet når patienten er i sideleje og kan anvendes til at bringe patienten i Semi-Fowler position (hovedgærde 30° og bækkensænkning 30°) ved at anbringe den under lårene.



Vend ➔


Abduktionskile 15x30x21 cm

- Denne pude kan anvendes i situationer hvor benene ikke må krydses i rygleje, eller som beskyttelse mod liggesår på knæene, ved at placere den mellem benene i sideleje.

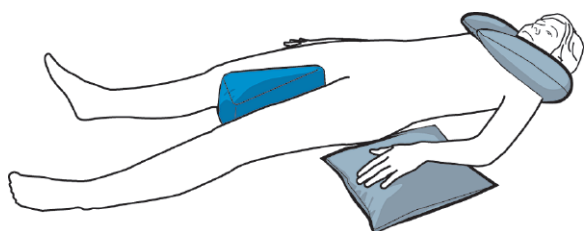

Hælbeskytter

- Egnet til at skabe 0-tryk under hælen og beskytter malleolerne. Hælbeskytteren følger med når patienten flytter fødderne. Den er ikke egnet til patienter med knækontrakturer.

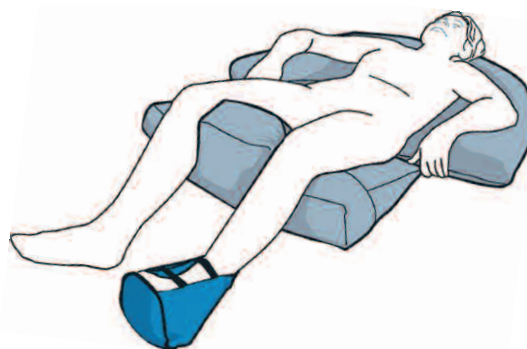

- Tilpasser sig patientens morfologi.
- Designet til forskellige positioneringer.
- Behageligt og køligt materiale.
- Vaskbart betræk i bomuld eller polyurethan er tilgængeligt.
- Små kugler gør det meget nemt at forme puderne som ønsket.

Produkt	Størrelse/pakning	Varenummer
Universalpude	1 stk. 60x40 cm	6100-0001
Universalpude	2 stk. 40x30 cm	6100-0011
Den bløde banan	1 stk. 180x31 cm	6100-0002
Decubitus lateral	1 stk. 180x31 cm	6100-0003
Halskraven	1 stk. 130x21 cm	6100-0004
Cylinder	1 stk. 70x18 cm	6100-0005
Cylinder	2 stk. 31x17 cm	6100-0015
Semi Fowler	1 stk. 70x56x15 cm	6100-0006
Trekanten	1 stk. 60x41 cm	6100-0007
Abduktionskile	1 stk. 15x30x21 cm	6100-0009
Hælbeskytter		6100-0008

- Materialer:** **Betræk:** Bielastisk induktionspolyurethan (185g/m²) med mikrobebeskyttelse.
Indhold: Mikrokugler i fin granulometri.
Mærker: CE mærket - NF en ISO 12952 (flammehæmmende materiale).
Rengøring: Aftør med en klud, brug normale rengøringsmidler. Ved kraftigere rengøring brug evt. Rodalonvand eller tilsvarende kvaternære ammoniumbaser.

Wel-Med / Scanbio

Wel-Med / Scanbio ApS, Industrivej 19 D, 4000 Roskilde, Danmark, Tlf. +45 46 37 45 99, Fax +45 46 37 46 79
 E-mail: scanbio@inet.uni2.dk, Homepage: www.scanbio.dk